A maior análise de uso e reclamações de mundo real do mercado americano





PRINCIPAIS CONCLUSÕES

A maior análise de reclamações comerciais e da Medicare dos EUA referente a quatro procedimentos de HPB mostra:

300 dias após o tratamento

 Os índices de complicações gerais são os mais baixos depois do procedimento com o Sistema UroLift®: 16,3% para o Sistema UroLift®; 19,7% para RTU; 21,6% para vaporização por laser verde; e 23,0% para Rezūm™

REAL

4 anos após o tratamento


 Os índices de retratamento são comparáveis entre o Sistema UroLift[®] (6,8%), RTU (6,3%) e vaporização por laser verde (7,0%), e são os mais altos após Rezūm™ (9,5%)

MOTIVO DO ESTUDO

- Os dados de mundo real podem proporcionar uma perspectiva adicional no debate sobre como as novas terapias de HPB são comparáveis entre elas e com cirurgias tradicionais
- Os índices de retratamento e complicação estão no centro da discussão, mas é difícil comparar ensaios controlados com diferenças significativas em termos de conceito e execução
- Uma análise em larga escala de reclamações pode proporcionar uma base de comparação de índices de retratamento após o procedimento

OBJETIVO DO ESTUDO

Avaliar índices de retratamento cirúrgico e complicações pós-operatórias em pacientes que foram submetidos a RTU, vaporização por laser verde, Sistema UroLift® ou Rezūm™.

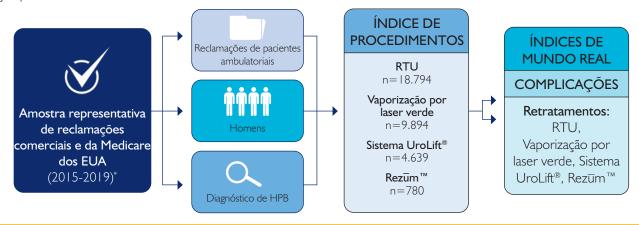

MÉTODO


- Análise observacional longitudinal em nível de paciente de uma amostra representativa de reclamações comerciais de pacientes ambulatoriais e da Medicare norte-americana de 2015 a 2019 obtidos da IBM Watson
- O banco de dados inclui homens com diagnóstico de HPB que foram submetidos a RTU, vaporização por laser verde, Sistema UroLift® ou Rezūm™
- Média de faixa etária no índice: 64 para Rezūm™, 65 para o Sistema UroLift® e 67 para vaporização por laser verde e RTU
- A análise de índices de evento inclui:

Novo tratamento cirúrgico: um segundo procedimento de HPB (Rezūm[™], vaporização por laser verde, RTU, o Sistema UroLift® ou HoLEP) subsequente aos procedimentos avaliados no estudo.

Complicação: Procedimento pós-operatório realizado durante uma consulta de retorno em um ambiente de paciente ambulatorial.


O ÍNDICE GERAL DE COMPLICAÇÕES É MAIS BAIXO APÓS O SISTEMA UROLIFT®

Incidência acumulativa de complicações após o Sistema UroLift® (PUL), Rezūm™ (WVT), vaporização por laser verde (PVP) e RTU por 365 dias

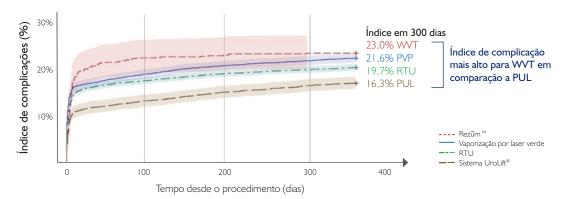

O ÍNDICE DE RETRATAMENTO CIRÚRGICO É O MAIS ALTO APŌS REZUM™

Incidência acumulativa de retratamento cirúrgico após o Sistema UroLift®, Rezūm™, vaporização por laser verde e RTU por 1.500 dias

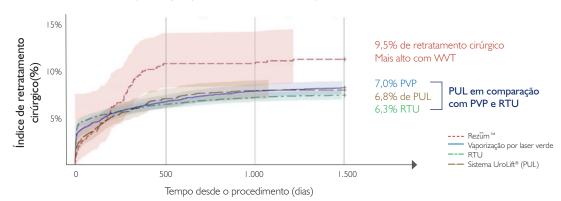

Indicado para o tratamento de sintomas de próstata aumentada até 100 ml em homens de 50 anos de idade ou mais.

Os resultados podem variar individualmente, como em qualquer procedimento médico. A maioria dos efeitos colaterais é temporária e inclui disúria, hematuria, dor pélvica, urgência urinária e incontinência de emergência (Roehrborn, J Urology 2013). Efeitos colaterais raros, entre eles sangramento e infecção, podem levar a consequências graves e exigir intervenção. Para obter mais informações, consultar as indicações aprovadas para a sua região e a bula. Ifuteleflex.com

É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todos os países. Para obter informações do produto, entre em contato com la.cs@teleflex.com ou com seu representante local. Consulte o status da aprovação regulatória local.

