

UROLIFT®

BPH Relief. In Sight.™



Modelo; não paciente

Informações para pacientes

O Sistema UroLift® é uma abordagem comprovada para tratar os sintomas da hiperplasia prostática - próstata aumentada - sem aquecer, cortar ou remover tecido¹⁻⁷


O que é **próstata aumentada**?

A hiperplasia prostática benigna, ou HPB, é uma doença comum na qual a próstata aumenta conforme os homens vão envelhecendo. Mais de 40% dos homens na faixa dos 50 anos e 70% dos homens a partir dos 60 anos têm HPB.¹ Embora a HPB seja uma doença benigna e não relacionada a câncer da próstata, ela pode afetar muito a qualidade de vida de um homem.


Conforme a próstata aumenta, ela pressiona e bloqueia a uretra, causando sintomas urinários incômodos, tais como:

- Necessidade frequente de urinar de dia e de noite
- Jato urinário fraco ou lento
- Sensação de não esvaziar toda a bexiga
- Dificuldade ou demora para começar a urinar
- Sensação urgente de necessidade de urinar
- Jato urinário que para e começa

Normal Prostate

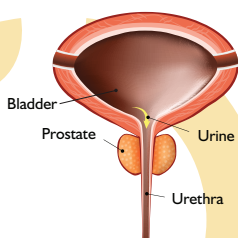

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)

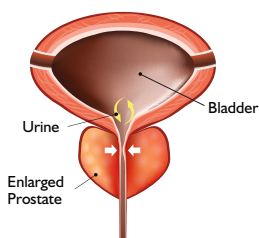



Modelo; não paciente




O que é o Sistema UroLift®?

O Sistema UroLift® é um procedimento minimamente invasivo para tratar os sintomas da hiperplasia prostática. É uma opção comprovada para pacientes que estão em busca de alternativas a medicamentos ou cirurgias. Sem aquecer, cortar ou destruir o tecido da próstata.¹⁻⁷

Vantagens do Sistema UroLift®

- ✓ Seguro e efetivo⁸
- ✓ Perfil de risco melhor que o relatado para procedimentos como a ressecção transuretral da próstata (RTU)⁹
- ✓ Alívio rápido dos sintomas,¹⁰ melhor que o relatado com medicamentos¹¹
- ✓ O procedimento de HPB mostrou não causar nenhuma nova disfunção sexual duradoura*¹¹⁻¹⁴

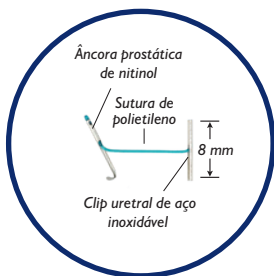

TAMANHO REAL

do implante UroLift®

*Nenhum novo caso de disfunção erétil ou ejaculatória duradouro em estudo pivotal de L.I.F.T.¹⁵

1. Lokeshwar, Transl Androl Urol 2019; 2. Miano, Med Sci Monit 2008;
3. Mirakhor, Can Assoc Rad J 2017; 4. Woo, BJUI 2011; 5. McVary, J Urol 2015;
6. Gilling, Can J Urol 2020; 7. Kadner, World J Urol 2020; 8. Roehrborn Urology Clinics 2016;
9. Sonksen, EU Urol, 2015; 10. Roehrborn, J Urology 2013;
11. AUA BPH Guidelines 2003, 2010, 2018, amended 2019;
12. Naspro, Eur Urol 2009; 13. Montorsi, J Urol 2008; 14. McVary, J Sex Med 2014
15. Roehrborn et al. Can J Urol 2017 5-Year LIFT Study.

Aviso: Este dispositivo contém aço inoxidável e nitinol, uma liga de níquel e titânio.

Pessoas que tenham reações alérgicas a esses metais podem sofrer uma reação alérgica a este implante. Antes do implante, fale com o seu médico sobre qualquer alergia/hipersensibilidade a esses materiais.

Como o Sistema UroLift® funciona



Etapa 1

O dispositivo de inserção UroLift é posicionado através da uretra obstruída para acessar a próstata aumentada.



Etapa 2

Os pequenos implantes UroLift são posicionados de forma permanente para levantar e afastar o tecido da próstata aumentada, expandindo a abertura da uretra.

Os implantes permanentes são inseridos através de uma pequena agulha que sai do dispositivo de aplicação UroLift e entra na próstata.




Etapa 3

O tratamento com o Sistema UroLift abre a uretra obstruída, proporcionando alívio rápido dos sintomas.



O que se espera durante o procedimento

- Se o Sistema UroLift® for adequado para você, seu médico irá fornecer informações detalhadas relativas ao procedimento.
- O médico insere um tubo fino através da uretra e posiciona implantes na próstata até obter uma abertura suficiente para a urina passar.

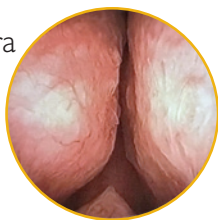

Visão do urologista da próstata obstruída

O que se espera após o procedimento

Os efeitos colaterais mais comuns são temporários. Entre eles estão dor ao urinar, sangue na urina, dor pélvica, urgência miccional e/ou incontinência por urgência. Efeitos colaterais raros, entre eles sangramento e infecção, podem levar a consequências graves e exigir intervenção. A maioria dos sintomas desaparece de duas a quatro semanas após o procedimento.¹



*Uretra desbloqueada após procedimento com o Sistema UroLift**

* Os resultados podem variar
1. Roehrborn, J Urology 2013 LIFT Study



Modelo; não paciente

PERGUNTAS FREQUENTES

PROCEDIMENTO

Como saber se eu posso ser candidato a um procedimento com o Sistema UroLift®?

Fale com seu médico para saber se você é candidato ao procedimento. Você pode ser candidato se for homem, de 50 anos de idade ou mais e tiver sintomas relacionados à HPB.

Quanto tempo meus resultados irão durar?

O procedimento com o Sistema UroLift foi projetado para ser uma solução duradoura para hiperplasia prostática benigna/ sintomas do trato urinário inferior (HPB/ STUI) que utiliza um implante permanentemente. Estudos clínicos demonstraram durabilidade por até cinco anos.¹ Os resultados podem variar individualmente.

Minha próstata continuará aumentando mesmo depois que eu receber um procedimento com o Sistema UroLift?

E se eu precisar de outro procedimento?

Sua próstata pode continuar crescendo após o procedimento; entretanto, receber tratamento com o Sistema UroLift não exclui tratamentos futuros adicionais com o Sistema UroLift ou outro procedimento.





QUAIS SÃO AS EXPECTATIVAS?

Com que rapidez posso esperar ter alívio dos sintomas?

Os pacientes podem experimentar períodos mínimos de inatividade após o tratamento e alívio dos sintomas a partir de duas semanas.²

Quando posso retomar minhas atividades habituais?

Muitos homens experimentam uma recuperação rápida dias após o procedimento.² Seu médico conversará sobre restrições e sua situação específica após o procedimento.

Precisarei continuar tomando meus remédios para HPB após o procedimento?

O objetivo do procedimento com o Sistema UroLift é proporcionar o alívio que você precisa para descontinuar a medicação para BPH. Seu médico irá decidir se é necessário continuar usando remédios para BPH.

Minha função sexual será afetada pelo procedimento com o Sistema UroLift®?

*Estudos clínicos mostraram que o procedimento com o Sistema UroLift não provoca casos de disfunção erétil ou ejaculatória nova continuada.^{*2} O mesmo não é possível afirmar em relação a outras terapias de BPH, como ressecção transuretral da próstata (RTUP), laser e inclusive medicamentos.³*

Posso ser submetido a Ressonância Magnética (RM) depois do procedimento com o Sistema UroLift?

O implante UroLift é condicional para ressonância magnética (MR Conditional) e os pacientes podem ser examinados com segurança depois de um tratamento com o Sistema UroLift. Converse com seu médico sobre essas condições de ressonância magnética (RM).

*No instances of new, sustained erectile or ejaculatory dysfunction in the L.I.F.T. pivotal study
2. Roehrborn, J Urology 2013 LIFT Study; 3. AUA BPH Guidelines 2003



E agora?

Você está preparado para assumir o controle dos seus sintomas de BPH? Não se conforme com sintomas urinários e medicação diária frustrantes. O procedimento com o Sistema UroLift® pode ser a opção certa para você, se estiver procurando uma solução de tratamento. E agora?

1. **Fale com seu médico** para saber se você é candidato ao procedimento com Sistema UroLift
2. **Seu médico** pode recomendar uma série de testes diagnósticos para avaliar sua condição

teleflex.link/Urolift.BR



Modelo; não paciente

UROLIFT®

Visite teleflex.link/Urolift.BR

Atendimento ao Cliente: la.cs@teleflex.com

Siga-nos no



@TeleflexLATAM

Encontre-nos em



facebook.com/TeleflexLATAM

A NeoTract, Inc. é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de dispositivos inovadores, minimamente invasivos e clinicamente efetivos que abordam necessidades não atendidas no campo de urologia. O foco da empresa é melhorar o padrão de atendimento de pacientes com hiperplasia prostática benigna (HPB), em um mercado com necessidades não atendidas.

Os resultados podem variar individualmente, como em qualquer procedimento médico. Converse com seu urologista para ver se o procedimento do Sistema UroLift® é o adequado para você. Os efeitos colaterais mais comuns são temporários. Entre eles estão dor ao urinar, sangue na urina, dor pélvica, urgência miccional e/ou incontinência por urgência. Efeitos colaterais raros, entre eles sangramento e infecção, podem levar a consequências graves e exigir intervenção.

Os produtos neste documento podem não estar disponíveis em todos os países. Entre em contato com seu representante local. Consulte o status da aprovação regulatória local. Consulte as Instruções de Uso aplicáveis para obter as indicações aprovadas na sua região.

BPH Relief. In Sight. UroLift, o logotipo do UroLift, NeoTract, o logotipo da NeoTract, Teleflex, e o logotipo da Teleflex, são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Registro da ANVISA: 80117580890 e 80117589018 © 2021 NeoTract, Inc. Todos os direitos reservados. MC-007138 LA PT

Contato: la.cs@teleflex.com

neotract**®** | **Teleflex®**

INTERVENTIONAL UROLOGY

Teleflex · 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560