


O que é o Sistema UroLift®?

O Sistema UroLift® é um procedimento minimamente invasivo para tratar os sintomas da hiperplasia prostática. Trata-se de uma opção comprovada para pacientes que estão procurando uma alternativa a medicamentos ou cirurgias. O procedimento para hiperplasia prostática que não exige aquecimento, corte ou destruição do tecido da próstata.¹⁻⁷

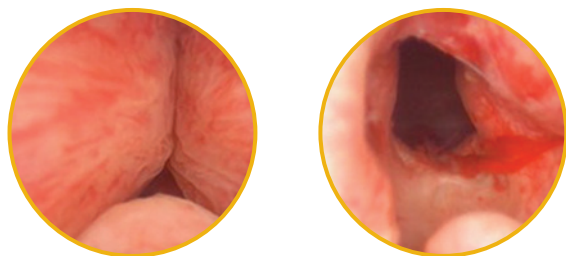

**Os resultados podem variar*

Benefícios do Sistema UroLift


Os pacientes mostraram ter uma experiência de recuperação melhor que da ressecção transuretral da próstata (RTU), com resultados duradouros e sem nenhuma nova disfunção sexual duradoura^{*8-14}

- **Rápido** alívio e recuperação em dias, não em meses^{8,15}
- **Baixa** taxa de cateter¹⁵
- O procedimento de HPB que não destrói tecido¹⁻⁷
- **Durabilidade** comprovada por cinco anos¹⁶
- **Resultados de estudo de vida real** altamente consistentes com dados randomizados controlados¹⁷

Aviso: Este dispositivo contém aço inoxidável e nitinol, uma liga de níquel e titânio. Pessoas que tenham reação alérgica a esses metais podem sofrer uma reação alérgica a este implante. Antes do implante, os pacientes devem ser orientados sobre os materiais contidos no dispositivo, bem como sobre o potencial de alergia/hipersensibilidade a esses materiais.

*Nenhum caso de disfunção erétil ou ejaculatória nova, sustentada em estudo pivotal de L.I.F.T.¹⁶

Sistema UroLift: UL400-AM

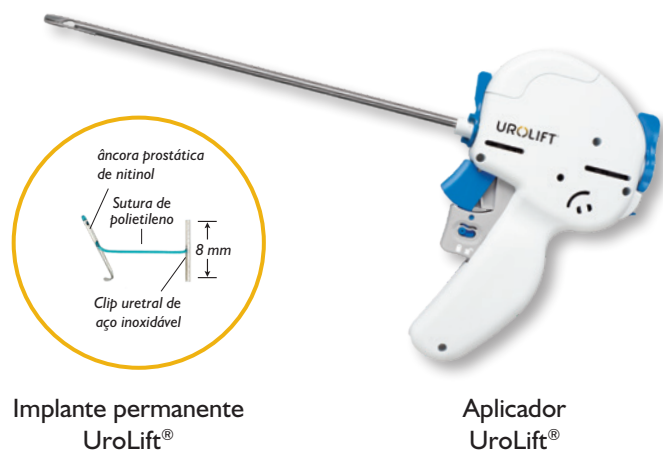

Implante permanente
UroLift®

Aplicador
UroLift®

O Dispositivo de aplicação UroLift® é inserido pela via uretral através de uma bainha rígida sob visualização cistoscópica, para poder chegar à área da obstrução.

Os lobos prostáticos que causam a obstrução são retraídos por pequenos Implantes UroLift permanentes, inseridos através de uma agulha que sai do dispositivo de aplicação.

Cada dispositivo de aplicação. UroLift contém um Implante UroLift.⁹



KIT DE PROCEDIMENTO AUXILIAR

Telescópio de 2,9 mm, 0°, 36 cm
(UL-SCOPE)




Bainha 20F
(UL-SHEATH)



Obturador visual
(UL-VO)

OUTROS

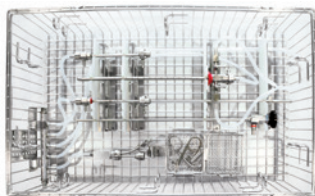

Cesta de limpeza e armazenamento
(UL-TRAY)

1. Lokeshwar, Transl Androl Urol 2019; 2. Miano, Med Sci Monit 2008; 3. Mirakhur, Can Assoc Rad J 2017; 4. Woo, BJUI 2011; 5. McVary, J Urol 2016; 6. Gilling, Can J Urol 2020; 7. Kadner, World J Urol 2016; 8. Roehrborn, Can J Urol 2015; 9. Roehrborn, J Urology 2013; 10. AUA BPH Guidelines 2003, 2010, 2018 amended 2019; 11. Naspro, Eur Urol 2009; 12. Montorsi, J Urol 2008; 13. McVary, J Sex Med 2016; 14. Sonksen Eur Urol 2015; 15. Shore Can J Urol 2014; 16. Roehrborn et al. Can J Urol 2017; 17. Eure et al J Endourol 2019

Indicado para o tratamento de sintomas de próstata aumentada até 100 ml em homens de 50 anos de idade ou mais. Os resultados podem variar individualmente, como em qualquer procedimento médico. A maioria dos efeitos colaterais é temporária e inclui hematúria, disúria, urgência urinária, dor pélvica e incontinência de emergência.⁹ Efeitos colaterais raros, entre eles sangramento e infecção, podem levar a consequências graves e exigir intervenção. Para obter mais informações, consulte as Instruções de uso. Os produtos neste documento podem não estar disponíveis em todos os países. Entre em contato com seu representante local. Consulte o status da aprovação regulatória local. Consulte as Instruções de Uso aplicáveis para obter as indicações aprovadas na sua região.

BPH Relief. In Sight. UroLift, o logotipo do UroLift, NeoTract, o logotipo da NeoTract, Teleflex, e o logotipo da Teleflex, são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Registro da ANVISA: 80117580890 a 80117589018.

© 2021 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados. MC-007134 LA PT

Para obter mais informações sobre o produto, entre em contato pelo endereço de e-mail la.cs@teleflex.com

neotract®

Teleflex®

UROLOGIA INTERVENCIONISTA